



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Digitální teploměr Big

Návod k použití

Určení přístroje:

Přístroj je určen k měření tělesné teploty zvířat.

Popis přístroje:

- Měřicí rozsah: 32 – 42 °C; teplotu lze měřit i ve °F
- Teploměr má flexibilní sondu
- Skladovací teplota: -25 – 55 °C při relativní vlhkosti menší než 95%
- Provozní teplota: 5 – 35 °C při relativní vlhkosti menší než 80%
- Teploměr se automaticky vypíná
- Váha: 27 g
- Baterie: CR2032

Postup měření:

- Před použitím vydezinfikujte sondu teploměru.
- Zmáčkněte vypínač na horním konci teploměru, ozve se krátké pípnutí, které indikuje, že je přístroj v provozu.
- Vyčkejte, až se na displeji objeví ikona „Lo °C“, °C bliká.
- Zaveďte měřicí sondu do rektu nebo tlamy zvířete.
- Po skončení měření (cca 10 s) zazní zvukový signál a °C přestane blikat.
- Po ukončení měření teploměr vypněte vypínačem na horním konci. Sám se vypne automaticky po 10 minutách nečinnosti.
- Pokud je naměřena teplota mimo teplotní rozsah 32 – 42 °C objeví se na displeji chybová hláška „HI °C“.
- Teplota pod 37,6 °C – normální teplota - zelené podsvícení displeje teploměru na 5 sec.
- Teplota nad 37,6 °C – vysoká teplota – červené podsvícení displeje teploměru na 5 sec.

Paměťové funkce:

Pro zjištění poslední naměřené hodnoty stiskněte na 2 vteřiny vypínač přístroje.

Objeví se nápis: LAST MEMORY a pod ním poslední naměřená hodnota.

Metody měření:

Tělesnou teplotu zvířat můžeme měřit v rektu (přesnější metoda) – zaveďte ohebnou sondu do rektu zvířete max. 2 cm hluboko.

Měření v tlamě je méně přesné, trvá cca 15 – 19 vteřin a je cca o 0,3 – 0,8 °C nižší než rektální teplota.

Čištění a dezinfekce:

Teploměr čistěte hadříkem namočeným v dezinfekci.

Bezpečnostní pokyny:

- Chraňte před účinky chemikálií a horké vody.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.
- Nerozebírejte teploměr kromě výměny baterií.
- Chraňte před nárazy.
- Neponořujte přístroj do kapalin na dobu delší než 30 min.
- Teploměr obsahuje malé části, uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Výměna baterie:

- Pokud se na displeji objevuje ikonka prázdné baterie nebo displej ani nesvítí, je třeba vyměnit baterii.
- Odstraňte kryt na spodní straně teploměru.
- Vyměňte baterii – typ CR2032.
- Nasad'te kryt zpět.

Záruční list – digitální teploměr BIG

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodejce :

